



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

De AFO hinged X is een Ankle Foot Orthosis (AFO). De orthese bestaat uit een zoolsegment op maat, een scharnier en een opstaande stang met kuitband. Deze kan ventraal (aan de voorkant) of dorsaal (aan de achterkant) worden voorzien.

L'AFO Hinged X est une orthèse cheville-pied. L'orthèse se compose d'un segment d'emboîture personnalisé, d'une charnière et d'une barre verticale avec une sangle de mollet. Il peut être fixé ventralement (à l'avant) ou dorsalement (à l'arrière).

AFO Hinged X

AFO à charnière X

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

Patiënten met een dropvoet waardoor de voet neerklappt op de grond. Deze patiënten hebben soms contracturen, soms hyperextensie in de knie en een passief minder goed corrigeerbare equinusstand. Bij passief corrigeren van de equinusstand is er een weerstand. Het is echter van belang het scharnier en de gebruikte veerunits af te stemmen volgens de noden van de patiënt. Ook de opbouw van het voetsegment en de plaatsing van de schalen is patiëntspecifiek. Tevens het plaatsen van de sluiting en de gebruikte polstermaterialen.

Werkingsmechanisme van het product

Dit hangt af van het type scharnier. Gelieve hiervoor uw verstrekker te contacteren. Dit product dient uitsluitend binnen een duidelijk revalidatieschema worden ingezet.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- zeer magere morfologie: gevaar voor drukplaatsen
- gevoelige huid
- geen mogelijkheid tot staptraining

2. Toepassen van het hulpmiddel

Gewenning aan het hulpmiddel

Het leren gebruiken van het product gebeurt in samenwerking met uw therapeut en orthopedisch verstrekker. De snelheid van aanleren is patiëntspecifiek en voor iedereen anders.

Dragen van het hulpmiddel

Deze orthese dient altijd rechtstreeks op de huid worden gedragen. Een eventuele dunne ondersleeve is wel mogelijk.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

Het belangrijkste materiaal is van het dragende gedeelte is carbon. Dit materiaal is zeer stijf en stevig, maar ook zeer licht. Het scharnier is gemaakt uit inox. De bekleding in het kuitgedeelte is 3D-stof. Op de voetplaat wordt Alcantara® of OnSteam® gebruikt.

De mogelijke scharnieren zijn:

- Tamarack®
- Caroli®
- Ultraflex®
- NeuroSwing®
- Multimotion®
- 17LA3®
- andere

Reinigingsinstructies

De bekleding van de kuitschaal is uitneembaar. Deze kan gewassen worden met de hand met een neutraal wasmiddel (bv. Sunlight®) en met lauw water. In de machine kan ook op een synthetisch programma max. 40°C. Het gebruik van wasverzachter wordt hierbij afgeraden, omdat de elastische eigenschap van het materiaal hiervan kapot gaat. Het zoolgedeelte kan met een vochtige doek gereinigd worden.

Onderhoudsadvies

Bij problemen steeds uw verstrekker contacteren. Het is geadviseerd om uw apparaat minimaal 1x per jaar te laten controleren. Dit wordt vergoed door uw mutualiteit.

Recyclage

Restafval & Metaalresten (scharnieren). Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

Les patients souffrant de pied tombant, ce qui entraîne la chute du pied au sol. Ces patients ont parfois des contractures, parfois une hyperextension du genou et une position équine passive qui est moins corrigible. La correction passive de la position équine implique une résistance. Cependant, il est important d'adapter la charnière et les unités de ressort aux besoins du patient. La construction du segment pied et l'emplacement des coquilles sont également spécifiques au patient, de même que la fermeture et les matériaux de rembourrage.

Fonctionnement du produit

Cela dépend du type de charnière. Veuillez contacter votre fournisseur. Ce produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un programme de réhabilitation clair.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

- très mauvaise morphologie : risque de points de pression
- peau sensible
- aucune possibilité de formation en échelon

2. Application du produit

Habitude à l'orthèse

L'apprentissage de l'utilisation du produit se fait en collaboration avec votre thérapeute et votre prestataire orthopédique. La vitesse d'apprentissage est spécifique au patient et différente pour chacun.

Le port de l'orthèse

Cette orthèse doit toujours être portée directement sur la peau. Une fine manchette peut être portée.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

Le matériau principal de la partie porteuse est le carbone. Ce matériau est très rigide et solide, mais aussi très léger. La charnière est en acier inoxydable. Le rembourrage au niveau du mollet est en tissu 3D. L'Alcantara® ou l'OnSteam® est utilisé pour le repose-pieds.

Les charnières possibles sont :

- Tamarack
- Caroli®
- Ultraflex® (en anglais)
- Le NeuroSwing®
- Multimotion
- 17LA3®
- autre

Instructions de nettoyage

La doublure en cuir de veau est amovible. Elle peut être lavée à la main avec un détergent neutre (par exemple Sunlight®) et de l'eau tiède. Il peut également être lavé en machine sur un cycle synthétique (max. 40°C). L'utilisation d'un adoucissant n'est pas recommandée, car il détruit les propriétés élastiques du matériau.

La semelle peut être nettoyée avec un chiffon humide.

Conseil en matière de soins

En cas de problème, contactez toujours votre fournisseur. Il est conseillé de faire contrôler votre appareil au moins une fois par an. Ces frais seront remboursés par votre caisse d'assurance maladie.

Recyclage

Déchets résiduels et ferraille (charnières). Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

