



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

De Arrow is een loophulpmiddel voor kinderen met een maximale ondersteuning van de sta-en stapfase. Hij biedt aan het kind de mogelijkheid om zich zelfstandig te verplaatsen. Een gevormde rompsteun biedt het kind stabiliteit en de bekkensteun zorgt ervoor dat het kind goed op zijn plaats blijft zitten. De tafel helpt mee aan een goede oprichting. De Arrow wordt door het kind geduwd, de opening van de boog wijst naar achter.

L' "Arrow" est une aide à la marche pour les enfants, avec un soutien maximal pour se tenir debout et marcher. Il permet à l'enfant de se déplacer de manière autonome. Un support de tronc moulé offre à l'enfant une stabilité et le support pelvien assure que l'enfant reste bien en place.

La table aide à établir une bonne base.

L' "Arrow" est poussée par l'enfant, l'ouverture de l'arc pointe vers l'arrière.

Arrow loophulp

aide à la marche "Arrow"

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

De Arrow is een loophulpmiddel voor kinderen met een maximale lengte van 140cm zonder zelfstandige steunfunctie. Het kind dient cognitief voldoende ontwikkeld te zijn om doelgericht te stappen.

Werkinsmechanisme van het product

- Het rompstuk, bekkenstuk en het zadeltje zorgen ervoor dat het kind mooi recht gepositioneerd wordt.
- Het zadel is stevig genoeg zodat het kind hier gerust kan op zitten.
- Het tafeltje zorgt voor een goede oprichting van de romp;
- Alle vier de wielen zijn zwenkend voor een maximale wendbaarheid.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Het hulpmiddel moet bij een eerste gebruik steeds ingesteld worden door een erkend verstrekker.
- Niet gebruiken bij onvoldoende cognitieve ontwikkeling.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Gewenning aan de loophulp

Het loophulpmiddel kan na afstelling direct in gebruik genomen worden onder begeleiding. Als het kind er genoeg mee vertrouwd is kan hij het zelfstandig gebruiken.

Aanleggen van de loophulp

Het kind goed recht positioneren in het loophulpmiddel en het bekkendeel goed vast aansluiten.

Kledij en gebruik van de loophulp

- Het kind kan er met zijn gewone, dagelijkse kledij in rechtstaan.
- Het apparaat dient op een vlakke ondergrond gebruikt te worden.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

- Het frame is vervaardigd uit gelakt staal en is ondersteund door vier geremde zwenkwieltjes
- De rompsteun en bekkensteun zijn gemaakt van ABS, verzacht met twee lagen bultex.
- De tafel is van schuim-PVC.
- De hoezen worden op maat gemaakt in kwaliteitsleder.

Reinigingsinstructies

Het volledige apparaat kan gereinigd worden met een vochtige doek, eventueel aangevuld met een desinfecterend schoonmaakmiddel.

Onderhoudsadvies

Zorg ervoor dat de afstellingen behouden blijven. Bij twijfel, raadplaag uw verstrekker.

Recyclage

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

L' "Arrow" est une aide à la marche pour les enfants d'une longueur maximale de 140 cm sans fonction de soutien indépendante. L'enfant doit être suffisamment développé sur le plan cognitif pour pouvoir faire un pas volontaire..

Fonctionnement du produit

- Le morceau de torse, le morceau de bassin et le morceau de selle assurent que l'enfant est bien placé en position verticale.
- La selle est assez solide pour que l'enfant puisse s'asseoir dessus.
- La table assure un bon alignement du torse
- Les quatre roues sont pivotantes pour une maniabilité maximale.
- L'appareil doit toujours être réglé par un fournisseur autorisé lorsqu'il est utilisé pour la première fois.
- Ne pas utiliser en cas de développement cognitif insuffisant.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

2. Application du produit

Habitude à l'orthèse

Après ajustement, l'aide à la marche peut être utilisée immédiatement sous surveillance. Lorsque l'enfant le connaît suffisamment bien, il peut l'utiliser de manière autonome.

Application de l'orthèse

Positionnez correctement l'enfant dans l'aide à la marche et reliez fermement la section pelvienne.

Vêtements et utilisation de l'orthèse

- L'enfant peut s'y tenir debout avec ses vêtements normaux de tous les jours.
- L'aide à la marche doit être utilisée sur une surface plane.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

- Le cadre est en acier laqué et est soutenu par quatre roues pivotantes freinées.
- Le support du tronc et le support pelvien sont en ABS, adouci par deux couches de bultex.
- La table est en mousse de PVC.
- Les couvertures sont faites sur mesure en cuir de qualité.

Instructions de nettoyage

L'ensemble de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide, si nécessaire avec un produit de nettoyage désinfectant.

Conseil en matière de soins

Veillez à ce que les paramètres soient maintenus. En cas de doute, consultez votre prestataire.

Recyclage

Déchets résiduels. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

