



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

De BOB (Boston Overlap Brace) rompmodule wordt bij post-operatieve en posttraumatische fixatie bij verschillende ziektebeelden van de rug ingezet en door de orthopedisch verstrekker individueel aangepast. De BOB brace wordt ook op maat vervaardigd en zal een individuele maatname plaatsvinden met gips of 3D scan.

Le corset de tronc Boston Overlap Brace est fabriqué sur mesure et peut être utilisé pour la fixation post-opératoire et post-traumatique dans diverses pathologies du dos. Pour cela une mesure individuelle sera faite avec du plâtre de Paris ou un scan 3D.

BOB korset
corset **BOB**

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product / indicaties

- Compressiefractuur
- Discopathie
- Lumbalgie
- Spinale stenose

Werkingsmechanisme van het product

- Voorkomen van standsafwijking
- Verminderen van standsafwijking
- Verminderen van bewegingsuitslag
- Verminderen en/of herverdelen van belasting

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Ernstige huidaandoeningen (bv. Epidermolysis bullosa,...)
- Er zal extra ruimte moeten worden voorzien voor onder andere:
 - » Baclofenpomp
 - » Drain van shunt
 - » Button voor sondevoeding
 - » Stoma
 - » Neurostimulator
 - » andere ...
- Extra aandacht bij patiënten met long of hart afwijkingen
- Extra aandacht bij reflux

2. Toepassen van het hulpmiddel

Aanleggen van het korset

1. Naadloos onderhemdje aandoen. Het korset openen en rond het lichaam draaien.
Zorg ervoor dat de sluiting vooraan komt.
2. De velcro sluiting sluiten.

Kledij

U kan gewoon gekleed gaan als voordien. Strakke broeken zullen wel een maatje groter moeten genomen worden, omdat het korset wat ruimte inneemt bij de heupen. Met de meeste kleren ziet u haast niets van het korset en zeker niet met iets lossere kledij.

Hygiëne

Onder het korset wordt er steeds een hemdje gedragen om het draagcomfort te verhogen (opnemen van zweet). Anders wordt het korset heel snel vuil. Het is belangrijk voldoende hemdjes te voorzien zodat er, zeker op warme dagen, regelmatig van hemdje kan worden gewisseld.

Het hemdje moet strak rond het lichaam zitten, zodat er geen plooien komen tussen de huid en het korset. Het moet voldoende lang zijn, zodat het tot onder het korset kan gedragen worden. Het is belangrijk dat de hemdjes naadloos zijn (geen naden aan de zijkanen). Naden zouden de huid kunnen irriteren. In de orthopedische werkplaats zijn er speciale korsethemdjes te verkrijgen.



1. Korsethemdjes met spaghetti bandjes en okselflapjes
2. Klassiek onderhemd met mouwen
3. Korsethemdjes zonder mouwen, met oksleflapjes

Het lichaam moet regelmatig gewassen worden. Dit mag met een gewone, neutrale zeep. Vergeet niet goed af te spoelen, zodat er geen zeepresten achter blijven. Het is af te raden uw huid in te smeren met crème (zeker geen vette crème), omdat de poriën hierdoor kunnen verstopen en irritatie kan ontstaan. Als de huid echt te droog is, kan u wel experimenteren met een neutrale (niet vette) bodymilk. De slip wordt meestal boven het korset gedragen, zodat die gemakkelijk kan worden uitgetrokken om naar het toilet te gaan. Ook de elastiek en eventuele naad van de slip kunnen overdruk veroorzaken.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

- Polyethyleen low density
- Velcricriemen met passant

Onderhoudsadvies

- Het korset regelmatig onderhouden.
- Het korset regelmatig controleren, bij barst of breuk zo snel mogelijk de orthopedisch verstrekker contacteren.
- De haakzijde van de velcro's regelmatig ontpluizen zodat deze goed blijven plakken.
- Wanneer U het korset niet meer voldoende kan aantrekken is het aangewezen het korset te laten controleren.
- Bij wonden of drukplekken zo snel mogelijk contact opnemen met de verstrekker.

Reinigingsinstructies

Het korset kan u uitwassen met water en neutrale zeep en afdrogen met een droge doek. Er wordt aangeraden de binnenkant af en toe (bijvoorbeeld één keer per week) te ontvetten met ether voor een grondige reiniging.

Recyclage

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO** LOCATIES



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

- Fracture de compression
- Discopathie
- Lumbago
- Sténose vertébrale

Mode d'action du produit

- Prévention des écarts de position
- Réduire l'écart de position
- Réduire l'amplitude de mouvement
- Réduire et/ou redistribuer la charge

Contre-indications ou risques potentiels d'utilisation

- Les troubles cutanés graves (par exemple, l'épidermolyse bulleuse,...)
- Il faudra notamment prévoir des espaces supplémentaires :
 - » Pompe à Baclofène
 - » Drainage du shunt
 - » Bouton pour l'alimentation par sonde
 - » Stoma
 - » Neurostimulateur
 - » autres ...
- Une attention particulière pour les patients souffrant de malformations pulmonaires ou cardiaques
- Une attention particulière pour le reflux

2. Application du produit

Application du corset

1. Mettez un maillot de corps sans couture. Ouvrez le corset et enroulez-le autour du corps, en vous assurant que la fermeture se trouve devant.
2. Fermez la fermeture velcro.

Vêtements

Vous pouvez vous habiller comme vous le faisiez auparavant. Les pantalons serrés devront être pris une taille de plus, parce que le corset prend de la place au niveau des hanches. Avec la plupart des vêtements, on peut à peine voir le corset et surtout pas avec quelque chose de plus lâche.

Hygiène

Une camisole est toujours portée sous le corset pour augmenter le confort (absorption de la sueur). Sinon, le corset se salit très vite. Il est important de prévoir suffisamment de camisoles pour pouvoir les changer régulièrement, surtout les jours de grande chaleur.

La camisole doit être serrée autour du corps pour qu'il n'y ait pas de plis entre la peau et le corset. Il doit être suffisamment long pour pouvoir être porté sous le corset. Il est important que les camisoles soient sans couture (pas de coutures sur les côtés). Les coutures peuvent irriter la peau. Des chemises de corset spéciales sont disponibles dans l'atelier orthopédique.



1. Chemisette pour corset avec bretelles et emmanchures doublées
2. Chemisette classique avec manches
3. Chemisette pour corset sans manches et emmanchures doublées

Le corps doit être lavé régulièrement. Cela peut être fait avec un savon normal et neutre. N'oubliez pas de bien rincer, afin de ne laisser aucun résidu de savon. Il n'est pas recommandé de se frotter la peau avec une crème (certainement pas une crème grasse), car cela peut boucher les pores et provoquer une irritation. Si la peau est vraiment trop sèche, vous pouvez expérimenter avec un lait corporel neutre (non gras).

Les slips sont généralement portés au-dessus du corset, de sorte qu'ils peuvent être facilement enlevés pour aller aux toilettes. L'élastique et les coutures des slips peuvent également provoquer une surpression.

3. Entretien du produit

Matériaux utilisés

- Polyéthylène basse densité
- Velcro avec passeur

Conseil en matière de soins

- Entretenir le corset régulièrement
- Vérifiez régulièrement le corset et contactez le détaillant orthopédique dès que possible en cas de fissure ou de rupture.
- Le côté crochet du velcro est régulièrement déroulé afin qu'il reste bien collé.
- Lorsque vous ne pouvez plus serrer suffisamment le corset, il est conseillé de faire vérifier le corset.
- En cas de blessures ou de marques de pression, contactez le prestataire dès que possible.

Instructions d'entretien

Vous pouvez laver le corset à l'eau et au savon neutre et le faire sécher avec un chiffon sec. Il est conseillé de dégraisser l'intérieur de temps en temps (par exemple une fois par semaine) à l'éther pour un nettoyage en profondeur.

Recyclage

Déchets résiduels.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

