



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

Een badpakkorset is een korset dat gemaakt wordt in combinatie met een loophulpmiddel 'type Arrow' van VIGO. Door de vorm van het korset wordt dit een badpakkorset genoemd. Dit korset wordt gebruikt bij jonge kinderen met weinig rompstabiliteit.

Un corset de maillot de bain est un corset fabriqué en combinaison avec une aide à la marche "type Arrow" par VIGO. Ce corset est utilisé avec les jeunes enfants qui ont peu de stabilité du tronc.

Badpakkorset corset maillot de bain

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product / indicaties

- Cerebrale parese
- Neuromusculaire aandoeningen

Werkingsmechanisme van het product

Kinderen met een lage rompstabiliteit (spiertonus in de romp) kunnen in dit korset volledig ondersteund worden. De aandacht kan dan volledig gericht worden op hoofdcontrole en het bewegen van de extremiteiten. (armen, benen)

Dit korset kan alleen gebruikt worden bij montage op een loophulpmiddel en loopt tussen de benen door net zoals bij een badpak. Dit zorgt ervoor dat de patiënt, zelfs wanneer hij of zij geen druk op de benen zet, veilig vastzit.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Ernstige huidaandoeningen (bv. Epidermolysis bullosa,...)
- Er zal extra ruimte moeten worden voorzien voor onder andere:
 - » Baclofenpomp
 - » Drain van shunt
 - » Button voor sondevoeding
 - » Stoma
 - » Neurostimulator
 - » andere ...
- Extra aandacht bij patiënten met long of hart afwijkingen
- Extra aandacht bij reflux

2. Toepassen van het hulpmiddel

Aanleggen van het korset

1. Het korset opentrekken en de patiënt langs boven in het korset zetten, één been aan elke kant van de steun.
2. Velcro's sluiten

Gewenning aan het korset

Dit korset vraagt geen aanpassingsperiode omdat dit enkel bij therapie gebruikt wordt.

Kledij

Het kind kan gewone, geen te dikke, kledij in het korset dragen.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

- Polypropyleen, afhankelijk van het postuur 3 of 4 mm materiaaldikte.
- Velcوريemen met passant met clipsluiting.
- Polyethyleen mousse binnenbekleding (volare).

Reinigingsinstructies

Het korset kan u uitwassen met water en neutrale zeep en afdrogen met een droge doek. Zeker niet met een haardroger! Er wordt aangeraden de binnenkant (mousse) af en toe (bijvoorbeeld één keer per week) te ontvetten met ether voor een grondige reiniging.

Onderhoudsadvies

- Het korset regelmatig onderhouden
- Het korset regelmatig controleren, bij barst of breuk zo snel mogelijk de orthopedisch verstrekker contacteren
- De haakzijde van de velcro's regelmatig ontpluizen zodat deze goed blijven plakken.
- Bij wonden of drukplekken zo snel mogelijk contact opnemen met de verstrekker.

Recyclage

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

- Paralysie cérébrale
- Maladies neuromusculaires

Fonctionnement du produit

Ce corset permet de soutenir pleinement les enfants ayant une faible stabilité du tronc (tonus musculaire du tronc).

L'attention peut alors se concentrer entièrement sur le contrôle de la tête et le mouvement des extrémités. (Bras, jambes)

Ce corset ne peut être utilisé que lorsqu'il est monté sur une aide à la marche et court entre les jambes comme un maillot de bain. Ainsi, même lorsque le patient n'exerce pas de pression sur ses jambes, celles-ci sont solidement attachées.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

- Les troubles cutanés graves (par exemple, l'épidermolyse bulleuse,...)
- Des espaces supplémentaires devront être prévus, entre autres :
 - » Pompe à Baclofène
 - » Drainage du shunt
 - » Bouton d'alimentation par sonde
 - » Stoma
 - » Neurostimulateur
- Une attention particulière pour les patients souffrant d'anomalies pulmonaires ou cardiaques et d'insuffisance respiratoire
- Attention particulière en cas de reflux

2. Application du produit

Application du corset

1. Ouvrez le corset et placez le patient dans le corset par le haut, une jambe de chaque côté du support.
2. Fermeture par velcro

Habitude au corset

Ce corset ne nécessite pas de période d'adaptation car il n'est utilisé qu'en thérapie

Vêtements

Vous pouvez mettre des vêtements normaux, pas trop encombrants, dans le corset.

3. Entretien de l'appareil

Matériaux utilisés

- Polypropylène, selon la taille 3 ou 4 mm d'épaisseur du matériau.
- Bandes velcro avec fermeture à clip.
- Doublure en mousse de polyéthylène (volare).

Instructions d'entretien

Vous pouvez laver le corset à l'eau et au savon neutre et le faire sécher avec un chiffon sec. N'utilisez pas de sèche-cheveux ! Il est conseillé de dégraisser l'intérieur (mousse) de temps en temps (par exemple une fois par semaine) à l'éther pour un nettoyage en profondeur..

Conseil en matière de soins

- Entretenir le corset régulièrement.
- Vérifiez régulièrement le corset et contactez le détaillant orthopédique dès que possible en cas de fissure ou de rupture.
- Le côté crochet du velcro est régulièrement déroulé afin qu'il reste bien collé.
- En cas de blessures ou de marques de pression, contactez le prestataire dès que possible.

Recyclage

Déchets résiduels. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

