



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

Een buikgordel is een medische bandage die gebruikt wordt ter ondersteuning van de buikwand. Het wordt gemaakt uit tijk (zeer stevig katoen) en elastiek, verstevigd met baleinen. Deze wordt door één van onze erkende bandagisten nauwkeurig opgemeten en wordt volledig op maat vervaardigd in ons eigen atelier.

Une ceinture abdominale est un pansement médical utilisé pour soutenir la paroi abdominale. Elle est faite de coton à coudre (coton très solide) et élastique, renforcée par des os. Il est mesuré avec précision par un de nos bandagistes certifiés et est ensuite fabriqué sur commande dans notre propre atelier.

Buikgordel

Ceinture abdominale

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product / indicaties

De gordel zorgt ervoor dat de buikwand op een kunstmatige manier wordt omvat zodat een onderbreking of een falen in de natuurlijke wand wordt opgevangen. Door de circulaire druk wordt de buikwand teruggedrongen.

- Nierptosis
- Uitgesproken diastase van de buikspieren
- Eventratie van de buikwand
- Belangrijke navelbreuk
- Stoma

Werkingsmechanisme van het product

Door de stevigheid van de gebruikte materialen zorgt een buikgordel voor een ondersteuning van de buikwand. Het korset omvat de volledige rompwand en geeft een circulaire druk waardoor de buikwand wordt teruggedrongen.

Mogelijke gebruiksrisico's of contra-indicaties

Een korset draag je niet op eigen initiatief. Laat je hierbij altijd adviseren door je behandelende arts.

Ingeval van eventratie of navelbreuk moeten deze steeds reponibel zijn.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Aanbrengen van het hulpmiddel

Plaats de gordel zodanig dat hij de buikwand goed omvat. Steeds sluiten van onderen naar boven.

Dragen van het hulpmiddel

Draag het korset niet onmiddellijk op de blote huid, maar draag steeds een onderhemdje of T-shirt (liefst katoen).

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

- Aan de buitenzijde tijk (= heel sterk katoenen weefsel met groot vochtopslopend vermogen)
- Aan de binnenzijde voeringkatoen
- Stikgaren katoen
- Tricot elastiek / Damier elastiek / thule elastiek
- spiraalbaleinen
- Boordlint
- Sluitingen: trekband met schuifgesp / haken en ogen / klittenband

Reinigingsinstructies

- Was uw buikgordel regelmatig, doch niet te frequent.
- Het wassen gebeurt met de hand in lauw-warm water met een niet agressief wasmiddel (of speciaal voor elastische stoffen)
- Geen droogkuis / niet stomen

Onderhoudsadvies

- Indien u een velcrosluiting heeft, kleef deze dan steeds op elkaar. De haakjeszijde dient regelmatige uitgekamd te worden om pluisjes te verwijderen.
- Bij beschadigingen dient u uw buikgordel zo snel mogelijk te laten herstellen. Wij raden u aan om uw buikgordel jaarlijks te laten nalijken.

Extra productinformatie

Om ons werk zo aangenaam mogelijk te maken bij eventuele herstellingen, vragen wij u om vooraf de gordel te reinigen.

De hernieuwingstermijn is afhankelijk van uw leeftijd :

- Onder 2 jaar : 6 maand
- Van 2 tot 16 jaar: 1 jaar
- Ouder dan 16 jaar: 3 jaar

Recyclage na gebruik

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

La gaine entoure artificiellement la paroi abdominale de manière à ce que toute interruption ou défaillance de la paroi naturelle soit prise en compte. La pression circulaire fait reculer la paroi abdominale.

- Ptose rénale
- Diastase prononcée des muscles abdominaux
- Eventration de la paroi abdominale
- Hernie ombilicale majeure
- Stoma

Fonctionnement du produit

En raison de la fermeté des matériaux utilisés, une ceinture abdominale permet de soutenir la paroi abdominale. Le corset entoure toute la paroi du torse et fournit une pression circulaire qui réduit la paroi abdominale.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

Vous ne devez pas porter un corset de votre propre initiative. Demandez toujours conseil à votre médecin.

En cas d'éventration ou de rupture de l'ombilic, celles-ci doivent toujours être réactives

2. Application du produit

Application de la ceinture

Positionnez la ceinture de manière à ce qu'elle englobe la paroi abdominale. Toujours fermer de bas en haut.

Port de la ceinture

Ne portez pas le corset directement sur la peau nue, mais portez toujours un sous-vêtement ou un T-shirt (de préférence en coton).

3. Entretien de l'appareil

Matériaux utilisés

- A l'extérieur, le ticking (= tissu de coton très solide avec une grande capacité d'absorption de l'humidité)
- Doublure en coton à l'intérieur
- Fil à coudre en coton
- Tricot élastique / Damier élastique / Thule élastique
- côtes en spirale
- Ruban
- Fermetures : tirette avec boucle coulissante / crochets et oeilletons / Velcro

Instructions d'entretien

- Lavez votre ceinture abdominale régulièrement, mais pas trop fréquemment.
- Le lavage se fait à la main à l'eau tiède avec un détergent non agressif (ou spécialement pour les tissus élastiques)
- Pas de nettoyage à sec / pas de vapeur

Conseil en matière de soins

- Si vous avez une fermeture velcro, collez-les toujours ensemble. Le côté du crochet doit être peigné régulièrement pour enlever les peluches.
- En cas de dommage, vous devez faire réparer votre ceinture abdominale le plus rapidement possible. Nous vous recommandons de faire contrôler votre ceinture de sécurité chaque année

Informations supplémentaires

Afin de rendre notre travail aussi agréable que possible lors d'éventuelles réparations, nous vous demandons de nettoyer la courroie au préalable.

La période de renouvellement dépend de votre âge :

- Moins de 2 ans : 6 mois
- De 2 à 16 ans : 1 an
- Plus de 16 ans : 3 ans

Recyclage après usage

Déchets résiduels. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

