



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

Orthesis in te delen in de categorie van voetoplifters.

Orthèse à classer dans la catégorie des releveurs de pied

Codivilla leder
Codivilla cuir

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

- Gebruikt voor slappe levator misvorming.
- Paresis.
- Involvement van de externe popliteale ischiaszenuw.

Werkingsmechanisme van het product

De orthese maakt het mogelijk, dankzij het blad van verenstaal dat zich achter in de kuit bevindt en daalt tot ter hoogte van de voet, de slappe voet op te tillen..

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Niet geschikt voor patiënten met spasticiteit of centraal motorisch syndroom.
- Risico op drukletsels bij diabetische patiënten.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

Orthese van voorgevormd leder met een verende stalen versteviging die van de achterkant van de kuit naar de voet loopt, onder een hoek van +/- 90°.

Reinigingsinstructies

Aérer l'orthèse si le patient à une forte sudation.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Aanlegging van het hulpmiddel

Direct in de schoen geplaatst en dan gebruikt als schoenlepel om de schoen aan te trekken. Zodra de voet in de schoen zit, bevestigt u de band bij de kuit om de brace op zijn plaats te houden.

Gewenning aan het hulpmiddel

De orthese wordt over het algemeen goed verdragen. Kan tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de hiel.

Dragen van het hulpmiddel

Draag altijd een sok om de voet te beschermen tegen wrijving.

Extra productinformatie

Renouvellement annuel de l'orthèse.

Recyclage

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijkcontainerpark.



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

- Utilisé pour une atteinte flasque des releveurs du pied.
- Parésie.
- Atteinte du nerf sciatique poplité externe.

Fonctionnement du produit

L'orthèse permet grâce à une lame en acier ressort située à l'arrière du mollet et descendant jusqu'au niveau du pied, de relever le pied ballant, flasque.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

- Ne convient pas aux patients spastiques ou ayant un syndrome moteur central.
- Risque de blessure par zone de pression chez les patients diabétiques.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

Orthèse réalisée en cuir moulé avec un renfort en acier ressort placé de l'arrière du mollet jusqu'au niveau du pied, dans un angle de +/- 90 °.

Instructions de nettoyage

Aérer l'orthèse si le patient à une forte sudation.

2. Application du produit

Application de l'orthèse

Mise en place directement dans la chaussure et est ensuite utilisée comme chausse-pied pour enfiler la chaussure. Une fois le pied mis en place dans la chaussure, fixer la sangle située au niveau du mollet pour maintenir l'orthèse en place.

Tolérance à l'orthèse

Orthèse bien tolérée en général. Peut nécessiter un temps d'adaptation au niveau du talon.

Le port de l'orthèse

Toujours porter une chaussette pour protéger le pied des frottements éventuels

Informations supplémentaires

Renouvellement annuel de l'orthèse.

Recyclage après usage

Déchets résiduels. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

