



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

Een Forced use glove kan je het best vergelijken met een washandje. Deze omvat de vingers, hand, pols en 1/3 van de onderarm.

Un gant à usage forcé est mieux comparé à un gant de toilette. Il couvre les doigts, la main, le poignet et un tiers de l'avant-bras.

Forced use glove

1. Pathologie / Indicaties

Beschrijving van het product

Deze bestaat uit neopreen/aerosoft in de vorm van een washandje met aan de onderzijde een ingestikte versteviging in een thermoplastisch materiaal om de vingers, hand en pols zo stil mogelijk te houden. Om zo weinig mogelijk beweging toe te laten. De sluiting is velcro aan de bovenzijde en dit zowel ter hoogte van de pols als op de hand.

Werkingsmechanisme van het product

De forced use glove gebruiken we om de niet aangedane zijde te inhiberen teneinde de aangedane zijde maximaal te stimuleren. Op deze manier proberen we de zelfredzaamheid van de patiënt op verschillende gebieden, zoals ADL, mobiliteit en sociale vaardigheden te optimaliseren evenals zichzelf zoveel mogelijk behelpen in de maatschappij.

Beoogd gebruik van het product / indicaties

- Personen met een fysieke beperking tgv een neurologische aandoening
- Personen met een fysieke beperking tgv een musculaire aandoening



2. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

- Aerosoft (goed ademend materiaal met wit coolmex laagje voor een koel aanvoelen)
- Neopreen
- Kunststof (het harde gedeelte)
- Klittenband

Recyclage

restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

Reinigingsinstructies

- Verwijder het kunststof gedeelte alvorens de stof te reinigen.
- Klittenbandsluitingen uitkammen en op elkaar bevestigen.

Neopreen: Met de hand wassen in lauw water en neutraal wasmiddel. Volledig laten opdrogen (niet op de verwarming of in de droogkast)

Aerosoft: Voor het reinigen van de bandage zijn er 2 mogelijkheden:

1. Wassen op 30° met een neutraal wasmiddel.
2. Handwas, waarbij u 2 druppels mirazyme per liter (bijgevoegd ontgeuringsmiddel) bij het water kunt toevoegen.

Laat volledig aan de lucht drogen, leg niet op de verwarming of stop de stof niet in de droogkast.



1. Pathologie / Indications

Description du produit

Il s'agit de néoprène/aérosoft sous forme de gant de toilette avec en bas un renfort cousu dans un matériau thermoplastique pour maintenir les doigts, la main et le poignet aussi immobiles que possible. Pour permettre le moins de mouvement possible. La fermeture est en velcro sur le dessus et ce tant au niveau du poignet que de la main.

Fonctionnement du produit

Nous utilisons le gant à usage forcé pour inhiber le côté non affecté afin de stimuler au maximum le côté affecté. Nous essayons ainsi d'optimiser l'autonomie du patient dans différents domaines, tels que la vie quotidienne, la mobilité et les compétences sociales, tout en l'aidant autant que possible dans la société.

Utilisation prévue du produit

- Personnes souffrant d'un handicap physique dû à une maladie neurologique
- Les personnes souffrant d'un handicap physique TV un trouble musculaire



2. Application du produit

Matériaux utilisés

- Aérosoft (matériau respirant avec une couche blanche de Coolmex pour une sensation de fraîcheur)
- Néoprène
- le plastique (la partie dure)
- Velcro

Recyclage

Déchets résiduels. Pour toute question, contactez le bureau parc de conteneurs local.

Instructions de nettoyage

- Retirez la partie en plastique avant de nettoyer
- Peignez les attaches Velcro et attachez-les ensemble

Néoprène: Laver à la main à l'eau tiède avec un détergent neutre. Laissez sécher complètement (pas sur le chauffage ni dans le sèche-linge)

Aérosoft: Il existe 2 options pour le nettoyage du pansement:

1. Laver à 30° avec un détergent neutre.
2. Laver à la main, en ajoutant à l'eau 2 gouttes de mirazyme par litre (désodorisant compris).

Laissez sécher complètement à l'air libre, ne le placez pas sur le radiateur ou ne le mettez pas dans le sèche-linge.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

