



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

De Kleenzach op zool is een Ankle Foot Orthosis (AFO). De orthese bestaat uit een zoolsegment op maat, een scharnier en een opstaande stang met kuitband.

La semelle de Kleenzach est une orthèse cheville-pied (AFO). L'orthèse se compose d'un segment de semelle sur mesure, d'une charnière et d'une barre verticale avec une sangle de mollet.

Kleenzach op zool

Kleenzach semelle

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

Patiënten met een dropvoet waardoor de voet neerklacht op de grond. Deze patiënten hebben geen contracturen, geen hyperextensie in de knie en een passief goed corrigeerbare equinusstand. Bij passief corrigeren van de equinusstand is er een lichte weerstand.

Werkingsmechanisme van het product

Wanneer de voet met de hiel neerkomt op de grond wordt het veertje ingedrukt. Hierdoor klapt de voet niet neer, maar gebeurt dit gedempt. Als de voet afgerold is en het been naar voren wordt gezwaaid houdt het veertje de enkel in 90° waardoor de tenen naar boven staan en een veilige stap kan gezet worden.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Spasticiteit
- Uitgesproken varus/valgusstand
- Zwakke quadriceps
- Niet corrigeerbare equinusstand

2. Toepassen van het hulpmiddel

Gewenning aan het hulpmiddel

Het apparaat vraagt enige gewenning, maar wordt meestal snel verdragen door de patiënt. Staptraining wordt steeds geadviseerd.

Dragen van het hulpmiddel

Het apparaat mag zowel rechtstreeks op de huid als over een broek of legging gedragen worden. Deze mag alleen niet te dik zijn omdat de maatname rechtstreeks op het been wordt uitgevoerd.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

Het belangrijkste materiaal is van het dragende gedeelte is carbon. Dit materiaal is zeer stijf en stevig, maar ook zeer licht. Het scharnier is gemaakt uit inox. De bekleding in het kuitgedeelte is 3D-stof. Op de voetplaat wordt Alcantara® gebruikt.

Reinigingsinstructies

De bekleding van de kuitband is uitneembaar. Deze kan gewassen worden met de hand met een neutraal wasmiddel (bv. Sunlight®) en met lauw water. In de machine kan ook op een synthetisch programma max. 40°C. Het gebruik van wasverzachter wordt hierbij afgeraden, omdat de elastische eigenschap van het materiaal hiervan kapot gaat.

Het zoolgedeelte kan met een vochtige doek gereinigd worden.

Onderhoudsadvies

Bij problemen steeds uw verstrekker contacteren. Het is geadviseerd om uw apparaat minimaal 1x per jaar te laten controleren. Dit wordt vergoed door uw mutualiteit.

Recyclage

Restafval & Metaalresten (scharnieren). Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE VIGO LOCATIES



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

Les patients ayant un pied tombant, ce qui entraîne une chute du pied au sol. Ces patients n'ont pas de contractures, pas d'hyper-extension du genou et une position équine passive corrigible. La correction passive de la position équine entraîne une légère résistance.

Fonctionnement du produit

Lorsque le pied frappe le sol avec le talon, le ressort est comprimé. Cela signifie que le pied ne descend pas, mais qu'il est amorti. Lorsque le pied est déroulé et que la jambe est balancée vers l'avant, le ressort maintient la cheville à 90°, ce qui signifie que les orteils sont dirigés vers le haut et qu'un pas sûr peut être effectué.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

- Spasticité
- Position prononcée en varus/valgus
- Faiblesse des quadriceps
- Position équine non corrigée

2. Application du produit

Habitude à l'orthèse

L'appareil nécessite un certain temps d'adaptation, mais il est généralement rapidement toléré par le patient. L'entraînement par paliers est toujours recommandé.

Le port de l'orthèse

Le dispositif peut être porté directement sur la peau ou par-dessus un pantalon ou un leggings. La jambe ne doit pas être trop épaisse, car la mesure est prise directement sur la jambe.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

Le matériau principal de la partie porteuse est le carbone. Ce matériau est très rigide et solide, mais aussi très léger. La charnière est en acier inoxydable. Le rembourrage au niveau du mollet est en tissu 3D. L'Alcantara® est utilisé sur le repose-pieds.

Instructions de nettoyage

La housse de la sangle de mollet est amovible. Elle peut être lavée à la main avec un détergent neutre (par exemple Sunlight®) et de l'eau tiède. Il peut également être lavé en machine sur un cycle synthétique (max. 40°C). Nous vous déconseillons d'utiliser un assouplissant, car cela endommagerait les propriétés élastiques du matériau.

La semelle peut être nettoyée avec un chiffon humide.

Conseil en matière de soins

En cas de problème, contactez toujours votre fournisseur. Il est conseillé de faire contrôler votre appareil au moins une fois par an. Ces frais seront remboursés par votre caisse d'assurance maladie.

Recyclage

Déchets résiduels et ferraille (charnières). Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

