



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

De Post-op Helm is een hoofdorthese om de schedel te beschermen tegen externe impact. De helm wordt voornamelijk voorgeschreven na het verwijderen van een deel van het bot uit de schedel (botluik).

Le casque post-opératoire est une orthèse crânienne destinée à protéger le crâne contre les chocs extérieurs. Le casque est principalement prescrit après le retrait d'une partie de l'os du crâne (trappe osseuse).

Post-Ophelm

Casque **Post-Opératoire**

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product / indicaties

De meest voorkomende oorzaken van een botluik zijn herseninfarct, schedelbreuk en tumoren, maar andere oorzaken zijn niet uitgesloten.

Beschrijving van het product

De helm wordt op maat gemaakt uit een polyethyleen buitenlaag en een dunne prix binnenlaag. De helm heeft verluchtingsgaten, maar enkel aan de gezonde zijde. De zijde waar het bot verwijderd is wordt volledig gesloten gehouden om de hersenen maximaal te beschermen. De zone van het botluik krijgt extra ruimte. Een kinbandje met druksluiting zorgt ervoor dat de helm niet kan uitvallen of verschuiven. Er bestaan verschillende types van sluiting: magneetslotje, drukslotjes of klikgespen.

Mogelijke gebruiksrisico's of contra-indicaties

De helm is niet gekeurd en vervangt in geen geval een fietshelm/veiligheidshelm/klimhelm.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Aanbrengen van het hulpmiddel

De helm wordt aangebracht zoals een fietshelm. Vermits deze op maat vervaardigd werd, zal deze eenvoudig over het hoofd schuiven, maar wel nauw aansluiten. De sluiting moet voor een optimale bescherming steeds gesloten zijn.

Hernieuwing

Kinderen tot 14 jaar hebben elk jaar recht op een nieuwe helm. Vanaf deze leeftijd tot 21jaar moet je de helm twee jaar dragen alvorens een nieuwe mogelijk is. Eens 21jaar of ouder wordt dit 5 jaar.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Reinigingsinstructies

Er bestaat in België geen recht op onderhoud indien de jaarlijkse hernieuwingstermijn méér dan twee jaar is (vanaf 14jaar).

Best kan je de binnenzijde van de helm regelmatig met alcoholgel reinigen en laten drogen aan de lucht.

Gebruik in geen geval een haardroger of andere externe warmtebron om de helm te drogen. Dit zal onherstelbare schade veroorzaken aan de helm. De buitenzijde kan je met een vochtige doek proper houden.

Let op! Na zware impact kan je best de helm laten controleren bij een erkend verstrekker om eventuele barsten of andere schade te laten opmeten. In geval van breuk kan hij een vervroegde aanvraag opstarten.

Recyclage na gebruik

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

Les causes les plus fréquentes d'une éclosion osseuse sont l'infarctus cérébral, la fracture du crâne et les tumeurs, mais d'autres causes ne sont pas exclues.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

Le casque n'est pas homologué et ne remplace pas un casque de vélo, un casque de sécurité ou un casque d'escalade.

Description du produit

Le casque est fabriqué sur mesure à partir d'une couche extérieure de polyéthylène et d'une fine couche intérieure de prix. Le casque a des trous de ventilation, mais seulement du côté sain. Le côté où l'os a été retiré est maintenu complètement fermé, afin de protéger le cerveau autant que possible. La zone de la trappe de l'os bénéficie d'un espace supplémentaire. Une mentonnière avec une fermeture à bouton-pression assure que le casque ne peut pas tomber ou se déplacer. Il existe différents types de fermetures : les fermoirs magnétiques, les fermoirs à pression ou les boutons-pression.

2. Application du produit

Application de l'attelle

Le casque est appliqué comme un casque de vélo. Comme il est fait sur mesure, il glissera facilement sur la tête, mais s'adaptera bien. La fermeture doit toujours être fermée pour une protection optimale.

Renouvellement

Les enfants jusqu'à 14 ans ont droit à un nouveau casque chaque année. À partir de cet âge et jusqu'à 21 ans, vous devez porter le casque pendant deux ans avant qu'un nouveau casque ne soit possible.

21 ans ou plus, cela devient 5 ans

3. Entretien du produit

Instructions de nettoyage

En Belgique, il n'y a pas de droit à une pension alimentaire si la période de renouvellement annuel est supérieure à deux ans (à partir de 14 ans). Il est préférable de nettoyer régulièrement l'intérieur du casque avec un gel à l'alcool et de le laisser sécher à l'air libre. N'utilisez en aucun cas un sèche-cheveux ou une autre source de chaleur externe pour sécher le casque. Cela causera des dommages irréparables au casque. L'extérieur peut être maintenu propre avec un chiffon humide.

Attention ! Après un choc violent, il est préférable de faire vérifier le casque par un fournisseur autorisé afin de mesurer les fissures ou autres dommages. En cas de rupture, il peut introduire une demande anticipée..

Recyclage après utilisation

Déchets résiduels. Pour toute question, contactez le bureau parc de conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

