



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

Een Post-op (Post operatief) korset is een korset dat net na de chirurgische ingreep wordt aangelegd. Vaak is dit na een fusie van enkele wervels, dit om de rug te immobiliseren totdat de rug voldoende hersteld is.

Un corset post-opératoire est un corset qui est mis juste après l'opération. Souvent, cela se fait après une fusion de plusieurs vertèbres, afin d'immobiliser le dos jusqu'à ce qu'il ait suffisamment récupéré.

Post-Op korset

Corset Post-opératoire

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

- Scoliosefusie
- Fusie van 2 of meerdere wervels
- ...


Werkingsmechanisme van het product

Stabiliseren en beschermen van de rug na chirurgische ingreep. Dit kan op 2 manieren:

- Als je als patiënt het bed niet mag verlaten en je moet zeer snel je korset hebben, dan wordt er in een lage temperatuur thermoplastische kunststof een korset rechtstreeks aangelegd in bed.
- Als je wel al voorzichtig mag en kan rechtstaan kan er een digitale scan worden genomen van het lichaam en wordt er een korset gemaakt in ons atelier volgens een versnelde procedure.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Ernstige huidaandoeningen (bv. Epidermolysis bullosa,...)
- Er zal extra ruimte moeten worden voorzien voor onder andere:
 - » Baclofenpomp
 - » Drain van shunt
 - » Button voor sondevoeding
 - » Stoma
 - » Neurostimulator
 - » andere ...
- Extra aandacht bij patiënten met long of hart afwijkingen
- Extra aandacht bij reflux

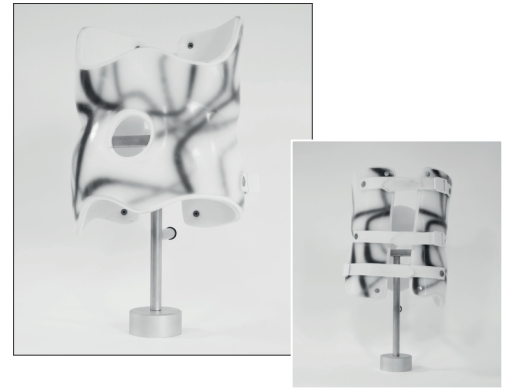

2. Toepassen van het hulpmiddel

Aanleggen van het korset

Het korset is doorgaans in 2 delen (bivalve) zodat het korset vanuit lig kan worden aangedaan in bed. Hiervoor is het best dat er iemand bij jou is om te assisteren.

1. Het is zeer belangrijk na een fusie om te draaien “in block”.
Dit wil zeggen dat de rug niet mag torsen (draaien). Hiervoor leg je het been van de zijde waarnaar je wil draaien gestrekt en het andere been in plooiing (flexie) met de voet in de knieholte.
De arm van de zijde waarnaar je wil draaien steek je omhoog zodat deze niet in de weg zit.
2. Draai op je zij waarbij de schouders en het bekken op één lijn blijven.
3. Dan zal de assistent de achterste schelp achter jou rug plaatsen en je begeleiden bij het terugdraaien “in block” zodat je met je rug in de schelp ligt.
4. Nadien kan dan de voorste schelp over de voorkant worden gelegd.
De voorste schelp past over de achterste schelp.
5. Als alles mooi op zijn plaats zit, mogen de velcrosluitingen worden gesloten

Kledij

U kan gewoon gekleed gaan als voordien. Strakke broeken zullen wel een maatje groter moeten genomen worden, omdat het korset wat ruimte inneemt bij de heupen. Met de meeste kleren ziet u haast niets van het korset en zeker niet met iets lossere kledij.

Hygiëne

Onder het korset wordt er steeds een hemdje gedragen om het draagcomfort te verhogen (opnemen van zweet). Anders wordt het korset heel snel vuil. Het is belangrijk voldoende hemdjes te voorzien zodat er, zeker op warme dagen, regelmatig van hemdje kan worden gewisseld.

Het hemdje moet strak rond het lichaam zitten, zodat er geen plooiën komen tussen de huid en het korset. Het moet voldoende lang zijn, zodat het tot onder het korset kan gedragen worden. Het is belangrijk dat de hemdjes naadloos zijn (geen naden aan de zijkant). Naden zouden de huid kunnen irriteren. In de orthopedische werkplaats zijn er speciale korsethemdjes te verkrijgen.



1. Korsethemdjes met spaghetti bandjes en oksel flapjes
2. Klassiek onderhemd met mouwen
3. Korsethemdjes zonder mouwen, met oksel flapjes

Het lichaam moet regelmatig gewassen worden. Dit mag met een gewone, neutrale zeep. Vergeet niet goed af te spoelen, zodat er geen zeepresten achter blijven. Het is af te raden uw huid in te smeren met crème (zeker geen vette crème), omdat de poriën hierdoor kunnen verstopt worden en irritatie kan ontstaan. Als de huid echt te droog is, kan u wel experimenteren met een neutrale (niet vette) bodymilk. De slip wordt meestal boven het korset gedragen, zodat die gemakkelijk kan worden uitgetrokken om naar het toilet te gaan. Ook de elastiek en eventuele naad van de slip kunnen overdruk veroorzaken.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

- Lage temperatuur thermoplast (rechstreeks in het ziekenhuis)
- Polyethyleen low density, afhankelijk van het postuur 3 of 4 mm materiaaldikte. (VIGO atelier)
- Velcricriemen met passant
- Polyethyleen mousse (volare) als polstering.
- Polyethyleen mousse als drukzone's

Reinigingsinstructies

Het korset kan u uitwassen met water en neutrale zeep en afdrogen met een droge doek. Zeker niet met een haardroger! Er wordt aangeraden de binnenkant (mousse) af en toe (bijvoorbeeld één keer per week) te ontvetten met ether voor een grondige reiniging.

Onderhoudsadvies

- Het korset regelmatig onderhouden.
- Het korset regelmatig controleren, bij barst of breuk zo snel mogelijk de orthopedisch verstrekker contacteren.
- De haakzijde van de velcro's regelmatig ontpluizen zodat deze goed blijven plakken.
- Wanneer U het korset niet meer voldoende kan aantrekken is het aangewezen het korset te laten controleren.
- Bij wonden of drukplekken zo snel mogelijk contact opnemen met de verstrekker.

Recyclage

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

- Fusion de scoliose
- usion de 2 ou plusieurs vertèbres
- ...

Fonctionnement du produit

Stabiliser et protéger le dos après l'opération. Cela peut se faire de deux manières :

- Si un patient n'est pas autorisé à quitter le lit et que vous avez besoin de votre corset très rapidement, un corset en thermoplastique basse température est appliqué directement sur le lit.
- Si vous êtes déjà capable de vous tenir debout avec précaution, un scan numérique du corps peut être effectué et un corset sera fabriqué dans notre atelier selon une procédure accélérée.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

- Les troubles cutanés graves (par exemple, l'épidermolyse bulleuse,...)
- Des espaces supplémentaires devront être prévus, entre autres :
 - » Pompe à Baclofène
 - » Drainage du shunt
 - » Bouton d'alimentation par sonde
 - » Stoma
 - » Neurostimulateur
 - » ...
- Une attention particulière pour les patients souffrant d'anomalies pulmonaires ou cardiaques et d'insuffisance respiratoire
- Attention particulière en cas de reflux



2. Application du produit

Application du corset

Le corset est généralement en deux parties (bivalve), de sorte que le corset peut être mis au lit en position couchée. Pour cela, il est préférable que quelqu'un soit avec vous pour vous aider

1. Il est très important, après une fusion, de tourner "en bloc". Cela signifie que le dos ne doit pas se tordre (tourner). Pour ce faire, posez la jambe du côté que vous souhaitez tourner en extension et l'autre jambe en flexion avec le pied dans le creux du genou. Levez le bras du côté que vous souhaitez tourner afin qu'il ne soit pas dans le chemin.
2. Ensuite, tournez-vous sur le côté, les épaules et le bassin alignés.
3. Ensuite, votre assistant placera la coque arrière derrière votre dos et vous guidera pour qu'elle se transforme en "bloc" afin que votre dos soit à l'intérieur de la coque.
4. Ensuite, la coquille avant peut être placée sur le devant. La coquille avant s'adapte à la coquille arrière.
5. Lorsque tout est en place, les fermetures Velcro peuvent être fermées.

Vêtements

Vous pouvez vous habiller comme vous le faisiez auparavant. Les pantalons serrés devront être pris une taille de plus, parce que le corset prend de la place au niveau des hanches. Avec la plupart des vêtements, on peut à peine voir le corset et surtout pas avec quelque chose de plus lâche.

Hygiène

Une camisole est toujours portée sous le corset pour augmenter le confort (absorption de la sueur). Sinon, le corset se salit très vite. Il est important de prévoir suffisamment de camisoles pour pouvoir les changer régulièrement, surtout les jours de grande chaleur.

La camisole doit être serrée autour du corps pour qu'il n'y ait pas de plis entre la peau et le corset. Il doit être suffisamment long pour pouvoir être porté sous le corset. Il est important que les camisoles soient sans couture (pas de coutures sur les côtés). Les coutures peuvent irriter la peau. Des chemises de corset spéciales sont disponibles dans l'atelier orthopédique.



1. Chemisette pour corset avec bretelles et emmanchures doublées
2. Chemisette classique avec manches
3. Chemisette pour corset sans manches et emmanchures doublées

Le corps doit être lavé régulièrement. Cela peut être fait avec un savon normal et neutre. N'oubliez pas de bien rincer, afin de ne laisser aucun résidu de savon. Il n'est pas recommandé de se frotter la peau avec une crème (certainement pas une crème grasse), car cela peut boucher les pores et provoquer une irritation. Si la peau est vraiment trop sèche, vous pouvez expérimenter avec un lait corporel neutre (non gras).

Les slips sont généralement portés au-dessus du corset, de sorte qu'ils peuvent être facilement enlevés pour aller aux toilettes. L'élastique et les coutures des slips peuvent également provoquer une surpression.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

- Thermoplastique à basse température (directement à l'hôpital)
- Polyéthylène basse densité, selon la taille 3 ou 4 mm d'épaisseur du matériau. (atelier)
- Velcro avec passeur
- Mousse de polyéthylène (volare) comme rembourrage.
- La mousse de polyéthylène comme zone de pression

Instructions d'entretien

Vous pouvez laver le corset à l'eau et au savon neutre et le faire sécher avec un chiffon sec. **N'utilisez pas de sèche-cheveux !** Il est conseillé de dégraisser l'intérieur (mousse) de temps en temps (par exemple une fois par semaine) à l'éther pour un nettoyage en profondeur.

Conseil en matière de soins

- Entretenir le corset régulièrement
- Vérifiez régulièrement le corset et contactez le détaillant orthopédique dès que possible en cas de fissure ou de rupture.
- Le côté crochet du velcro est régulièrement déroulé afin qu'il reste bien collé.
- Lorsque vous ne pouvez plus serrer suffisamment le corset, il est conseillé de faire vérifier le corset.
- En cas de blessures ou de marques de pression, contactez le prestataire dès que possible.

Recyclage

Déchets résiduels.

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

