



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

Met de preelbandage willen we de sub-luxatie van de schouder tegen gaan.
De bandage wordt volledig op maat vervaardigd om de nodige ondersteuning en correctie te bieden.

Avec l'attelle de Preel, nous voulons contrer la sous-luxation de l'épaule.
Le bandage est fait sur mesure pour apporter le soutien et la correction nécessaires.


Preelbandage

Atelle de **Preel**

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

Het schoudergewricht wordt grotendeels gestabiliseerd door spieren, door de verlamming van deze spieren trekt het gewicht van de arm het schoudergewricht uit elkaar.

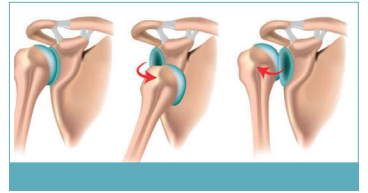

Werkingmechanisme van het product

De bandage steunt de weke delen in de oksel waardoor de sub-luxatie vermindert en het schoudergewricht weer beter op z'n plaats zit en de pijn vermindert.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

De borstband heeft als doel het geheel op z'n plaats te houden, deze mag echter niet te strak worden aangespannen om de ademhaling niet te belemmeren.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Gewenning

De preelbandage kan rechtstreeks op de huid worden gedragen, we raden echter aan om onder de bandage een onderhemdje te dragen, dit verhoogt het comfort en de hygiëne.

Aanleggen van het hulpmiddel

Voor het aanleggen van de preelbandage zijn er twee mogelijkheden:

- 1. Met hulp:** Breng de borstband aan met de sluiting vooraan. Zorg ervoor dat de okselflapjes mooi onder de oksel zitten. Trek nu de band onder de oksel naar boven (terwijl de arm wordt ondersteund = schoudergewricht op z'n plaats) en kleef deze achteraan vast.
- 2. Zonder hulp:** Als u de preelbandage uit doet zonder de schouderband los te maken kan u hem ook zó weer aan doen (principe van een rugzak). Steek de arm door de opening en trek de schouderband over de schouder (terwijl uw elleboog steunt op bv. een tafel), sluit daarna de borstband.

Bekijk ook het filmpje op onze website (www.vigogroup.eu/aanbod/orthesen/bovenste-ledematen)

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Onderhoudsadvies

De preelbandage kan op 30° in de wasmachine worden gewassen met een gewoon wasmiddel. Alvorens de bandage te wassen, de klittebandsluiting uitkammen en sluiten.

Laat volledig drogen, leg niet op de verwarming of stop de stof niet in de droogkast.

Als er na het wassen toch nog een geur is achtergebleven in de stof, dan kan u het bijgeleverde onderhoudsmiddel gebruiken. De inhoud hiervan is voldoende om op te lossen in 75l water. (= +/- 4 druppels per liter) Los een 4 tal druppels op per liter water en dompel de bandage onder tot de stof volledig is doordrenkt, wring de stof uit en laat drogen (Niet naspoelen, de enzymen gaan de bacteriën -die zorgen voor de geurtjes- te lijf).

Extra: Soms wordt er ook een draagzak voorzien die bevestigd kan worden aan de borstband.

Recyclage

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu




1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

L'articulation de l'épaule est en grande partie stabilisée par des muscles. En raison de la paralysie de ces muscles, le poids du bras tire l'articulation de l'épaule en dehors.

Fonctionnement du produit

Le support soutient les tissus mous de l'aisselle de sorte que la sous-luxation est réduite et que l'articulation de l'épaule est remise en place plus efficacement, ce qui réduit la douleur.

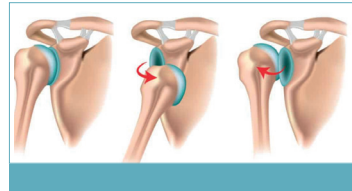

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

Le but de la sangle thoracique est de maintenir l'appareil en place, mais il ne faut pas la serrer trop fort pour ne pas gêner la respiration.

2. Application du produit

Habitude au produit

L'attelle Preel peut être portée directement sur la peau, cependant, nous recommandons de porter un sous-vêtement sous le bandage pour augmenter le confort et l'hygiène.

Application du produit

Il y a deux options pour mettre l'attelle Preel :

1. **Avec assistance** : Appliquez le bandage de poitrine avec la fermeture frontale. Veillez à ce que les aisselles soient sous l'aisselle. Maintenant, tirez la sangle sous l'aisselle (tout en soutenant le bras = articulation de l'épaule en place) et fixez-la à l'aide de ruban adhésif dans le dos.
2. **Sans aide** : si vous enlevez le bandage de pré-soutien sans défaire la bandoulière, vous pouvez le remettre en un rien de temps (principe de la d'un sac à dos). Passez votre bras dans l'ouverture et tirez la bandoulière sur votre épaule (en appuyant votre coude sur une table, par exemple). Ensuite, fermez la sangle de poitrine.

Regardez également le vidéo sur notre site web (www.vigogroup.eu/fr/offrir/ortheses/membres-superieurs)

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Instructions d'entretien

L'attelle de Preel peut être lavée en machine à 30° avec un détergent normal. Avant de se laver, peignez et fermez la fermeture velcro. Laisser sécher complètement, ne pas mettre sur le chauffage ni dans le sèche-linge.

S'il reste une odeur dans le tissu après le lavage, vous pouvez utiliser le produit d'entretien fourni.

Le contenu est suffisant pour se dissoudre dans 75 litres d'eau. (= +/- 4 gouttes par litre) Dissoudre 4 gouttes par litre d'eau et submerger le pansement jusqu'à ce que le tissu soit complètement trempé, l'essorer et le laisser sécher (ne pas rincer, les enzymes détruisent (Ne pas rincer, les enzymes vont attaquer les bactéries qui provoquent les odeurs).

Extra : Parfois, un sac de transport est également fourni, qui peut être attaché à la sangle de poitrine.

