



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

De PTB op schoen/Birko is een Ankle Foot Orthosis met condylobouw.

PTB staat voor Patella Tendon Bearing. Deze techniek is overgenomen uit de prothesiologie. Door de suspensie op te nemen op het onderbeen, kunnen lager gelegen lichaamsstructuren gedeeltelijk of volledig ontlast worden.

Le PTB sur chaussure/Birko est une orthèse cheville-pied avec construction condylienne. PTB est l'abréviation de Patella Tendon Bearing. Cette technique a été adoptée par les prothèses. En incorporant la suspension sur la jambe inférieure, les structures du bas du corps peuvent être partiellement ou totalement soulagées.

PTB op schoen

PTB sur chaussure / birko

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product

Pathologieën waarbij de voet slechts gedeeltelijk belast mag worden. Enkel de voorvoet en de middenvoet worden belast. De belasting kan progressief worden opgebouwd door de stangen te verplaatsen. Ook aanpassingen van de zool zijn mogelijk. Dit gebeurt steeds in overleg met uw verstrekker.

Werkingsmechanisme van het product

Door het onderbeen in een koker te laten rusten, komt de hiel een 2-tal centimeter van de grond. De achterliggende gewrichtsstructuren in de voet worden zo ontlast. Het is mogelijk om normaal rond te stappen, eventueel ondersteund door een paar krukken of een rollator. Aan de gezonde zijde moet altijd gekeken worden dat men op gelijke hoogte staat, om klachten thv. het bekken, de rug en de nek te vermijden.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

- Overbelasting van de voorvoet
- Drukplaatsen
- Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met uw verstrekker bij eventuele problemen.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Gewenning aan het hulpmiddel

De draagtijd van het apparaat dient opgebouwd te worden. Dit hangt af van de morfologie van de patiënt. Normaal gezien moet het mogelijk zijn om na een week het apparaat vlot en gedurende lange perioden zonder problemen te kunnen gebruiken. Als dit niet lukt, moet dit bekeken worden met uw zorgverstrekker.

Dragen van het hulpmiddel

De PTB dient altijd rechtstreeks recht op de huid gedragen te worden en nooit boven een broek. Er komt immers veel kracht op het onderbeen en het dragen van een broek kan daarbij ernstige drukwonden veroorzaken.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

Het dragende gedeelte is gemaakt uit carbon. De stangen, scharnieren en spoorplaat (opbouwstuk op de schoen) is vervaardigd uit inox. De polstering van het beensegment is gemaakt uit Pedilin SilverShield®. Dit is een polyethyleen schuim met hoge anti-bacteriële eigenschappen. De skisluitingen zorgen voor een stevige fitting waardoor de ophanging van het onderbeen is gegarandeerd.

Reinigingsinstructies

De polstering is afwasbaar met een vochtige doek. Eventueel kan deze gedrenkt worden in een ontsmettend wasmiddel (bv. Dettol®).

Onderhoudsadvies

- De scharnieren dienen regelmatig gecontroleerd te worden;
- De vijsjes dienen regelmatig gecontroleerd te worden.
- Als er zich problemen voordoen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw zorgverstrekker.

Recyclage

Restafval & Metaalresten (scharnieren). Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

Pathologies dans lesquelles le pied ne peut être que partiellement mis en charge. Seuls l'avant-pied et le médio-pied sont sollicités. La charge peut être augmentée progressivement en déplaçant les barres. Des adaptations de la semelle sont également possibles. Cela se fait toujours en consultation avec votre fournisseur de soins.

Fonctionnement du produit

En reposant la jambe inférieure dans une douille, le talon s'élève d'environ 2 centimètres du sol. Les structures articulaires sous-jacentes du pied sont ainsi soulagées. Il est possible de se déplacer normalement, éventuellement soutenu par une paire de béquilles ou un déambulateur. Du côté sain, il faut toujours veiller à se tenir à la même hauteur, afin d'éviter les plaintes au niveau du bassin, du dos et du cou.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

- Surcharge de l'avant-pied
- Points de pression
- En cas de problème, veuillez contacter votre fournisseur le plus rapidement possible.

2. Application du produit

Habitude à l'orthèse

La durée d'utilisation de l'appareil doit être augmentée. Cela dépend de la morphologie du patient. Normalement, après une semaine, il devrait être possible d'utiliser l'appareil sans problème pendant de longues périodes. Si ce n'est pas le cas, vous devez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Le port de l'orthèse

Le PTB doit toujours être porté directement sur la peau et jamais par-dessus un pantalon. Après tout, la jambe inférieure est soumise à une force importante et le port d'un pantalon peut provoquer de graves plaies de pression.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

La partie porteuse est en carbone. Les tiges, les charnières et la plaque d'éperon (la partie supérieure du sabot) sont en acier inoxydable. Le rembourrage du segment de jambe est en Pedilin SilverShield®. Il s'agit d'une mousse de polyéthylène aux propriétés antibactériennes élevées. Les attaches de ski assurent un ajustement sûr et la suspension de la jambe inférieure est garantie.

Instructions de nettoyage

Le rembourrage peut être nettoyé avec un chiffon humide. Si nécessaire, il peut être trempé dans un détergent désinfectant (par exemple Dettol®).

Conseil en matière de soins

- Les charnières doivent être contrôlées régulièrement ;
- Les vis doivent être contrôlées régulièrement.
- En cas de problème, vous devez contacter votre fournisseur de soins de santé dès que possible.

Recyclage

Déchets résiduels et ferraille (charnières). Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

