



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

De redressiehelm wordt aangeraden bij kinderen met afvlakking van de schedel.

Le casque de protection est recommandé pour les enfants ayant le crâne aplati.

Redressiehelm

Casque de **remodelage**

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van de helm

Wetenschappelijk onderzoek heeft nog niet kunnen achterhalen wat de oorzaken zijn van deze afvlakkingen. Wel wordt vermoed dat een voorkeurshouding in de baarmoeder een rol speelt. Deze houding wordt door de kindjes na de bevalling dikwijls aangenomen. We geven op de plaats van de afvlakking ruimte in de helm zodat de schedel hier kan bijgroeien. Op de niet afgevlakte plaatsen sluiten we mooi aan. Zo streven we naar de gewenste symmetrie.



Werkingsmechanisme van de helm

De helm wordt 23 op 24 uur gedragen. Het resterende uur wordt gebruikt voor de persoonlijke verzorging. Elke maand plannen we een controleafspraak om de helm aan te passen zodat er opnieuw plaats is om te groeien in de gewenste richting. Om de 3 maanden nemen we een controle scan om de evolutie te kunnen opvolgen. Naargelang de evolutie kan er beslist worden om het aantal draaguren per dag af te bouwen.

Contra-indicaties of mogelijke gebruiksrisico's

Drukplekken Drukplekken zijn rode plekken op het hoofdje van uw kind. Als de plek verdwijnt na een uur is er geen probleem en mag u de helm gewoon terug opzetten. Neem contact met ons op als de plek na een uur nog steeds fel rood is en laat de helm uit tot deze is aangepast.

Warmteafvoer 80% van onze lichaamswarmte gaat verloren via ons hoofd en onze nek. De redressiehelm houdt de warmte vast, waardoor afkoeling moeilijker wordt. Daarom volgende aandachtspunten:

- Bij koorts (meer dan 38°) wordt de helm niet gedragen. Indien de koorts geheel weg is mag de helm weer gedragen worden.
- Kleed uw kind vooral 's nachts niet te warm, dit om de warmteafvoer te bevorderen.
- Korte haren zijn de beste mode tijdens de draagperiode van de helm. Lange haren zorgen voor een verminderde warmteafvoer.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Gewenning aan de helm

De helm wordt 23 op 24 uur gedragen. Het resterende uur wordt gebruikt voor de persoonlijke verzorging.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Onderhoudsadvies

De helm dient elke dag gereinigd te worden. Best doet u dit voordat u uw kind in bad stopt, zo heeft de helm voldoende tijd om te drogen.

- Maak de mousse-laag aan de binnenzijde elke dag schoon met een vochtig doekje of alcoholgel.
- Dompel de helm nooit onder in water. Indien water en/of zeepresten tussen de lagen komt, kan dit een onaangename geur verspreiden.
- Strooi geen talkpoeder in de helm. Dit verergert enkel het geurprobleem en maakt het moeilijker om de helm te reinigen.
- Leg de helm nooit op de verwarming of droog hem niet met een haardroger. De mousse is hittegevoelig en gaat hierdoor krimpen.

Recyclage na gebruik

Restafval.

Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.



SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

La recherche scientifique n'a pas encore pu déterminer les causes de ces aplatissements. Cependant, on soupçonne qu'une posture préférée dans l'utérus joue un rôle. Cette position est souvent adoptée par les bébés après la naissance. Nous fournissons un espace dans le casque à l'endroit de l'aplatissement afin que le crâne puisse y pousser. Sur les endroits qui ne sont pas aplatis, nous nous adaptons bien. De cette manière, nous nous efforçons d'atteindre la symétrie souhaitée.



Fonctionnement du casque

Le casque est porté 23 heures sur 24. L'heure restante est utilisée pour les soins personnels. Chaque mois, nous organisons un rendez-vous de contrôle pour ajuster le casque afin qu'il puisse repousser dans la direction souhaitée. Tous les trois mois, nous effectuons un contrôle par balayage pour suivre l'évolution. En fonction de l'évolution, il peut être décidé de réduire le nombre d'heures de port du casque par jour.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

Points de pression Les points de pression sont des taches rouges sur la tête de votre enfant. Si la tache disparaît après une heure, il n'y a pas de problème et vous pouvez simplement remettre le casque. Si la tache est toujours rouge vif après une heure, contactez-nous et laissez le casque éteint jusqu'à ce qu'il soit ajusté.

Dissipation de la chaleur 80 % de la chaleur de notre corps est perdue par notre tête et notre cou. Le casque de récupération retient la chaleur, ce qui rend le refroidissement plus difficile. Par conséquent, les points d'attention suivants :

- En cas de fièvre (plus de 38°), le casque ne doit pas être porté. Si la fièvre a complètement disparu, le casque peut être porté à nouveau.
- N'habillez pas votre enfant trop chaudement, surtout la nuit, pour favoriser la dispersion de la chaleur.
- Les cheveux courts sont la meilleure mode pendant la période de port du casque. Les cheveux longs réduisent la dispersion de la chaleur.

2. Application du produit

Habituation au casque

Le casque est porté 23 heures sur 24. L'heure restante est utilisée pour les soins personnels.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Conseil en matière de soins

Le casque doit être nettoyé tous les jours. Il est préférable de le faire avant de mettre votre enfant dans le bain, de cette façon le casque a suffisamment de temps pour sécher.

- Nettoyez chaque jour la couche de mousse à l'intérieur avec un chiffon humide ou du gel à l'alcool.
- Ne jamais immerger le casque dans l'eau. Si de l'eau et/ou des résidus de savon s'infiltraient entre les couches, cela peut provoquer une odeur désagréable.
- Ne mettez pas de talc dans le casque. Cela ne fera qu'aggraver le problème des odeurs et rendra le nettoyage du casque plus difficile.
- Ne mettez jamais le casque sur le radiateur ou ne le séchez pas avec un sèche-cheveux. La mousse est sensible à la chaleur et va rétrécir.

Recyclage après usage

Déchets résiduels. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.



SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

