



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

SMO staat voor Supra Malleoleire Orthese en is een voetorthese waarbij de volledige voet omvat wordt en loopt tot boven de enkels.

Ter hoogte van de wreef kan het gaan om een open of een gesloten model.

SMO signifie Supra Malleolar Orthosis (orthèse mal-léolaire supra) et est une orthèse plantaire qui englobe tout le pied et s'étend au-dessus de la cheville.

Le cou-de-pied peut être un modèle ouvert ou fermé.

SMO

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product / indicaties

- Extreme platvoet of knik-platvoet
- Instabiliteit van het bovenste spronggewricht
- Algemene laxiteit van de voet
- Aangewezen bij kinderen met CP (diplegie), vertraagde motorische ontwikkeling met instabiliteit, down syndroom, Charcot-Marie-Tooth (beginstadium)

Werkingsmechanisme van het product

Wanneer de gewrichtsbanden en spieren van de voet onvoldoende steun kunnen geven en de voet niet meer met een gewone steunzool kan worden gecorrigeerd is een SMO een goed alternatief. Door de voet volledig te omvatten en steun te geven tot boven de enkels kan er wel voldoende correctie geboden worden.

Mogelijke gebruiksrisico's of contra-indicaties

Mogelijks kunnen drukpunten optreden thv van beenderige structuren van de voet. Dit uit zich in roodheid, die bij het uittrekken nog feller rood word en lang rood blijft. Dit kan pijnklachten geven of bij verminderde gevoeligheid aanleiding zijn van drukwondjes.

Bij abnormale roodheid moet er steeds contact worden opgenomen met de zorgverstrekker om het apparaat aan te passen. Roodheid onmiddellijk na het uittrekken die op heel korte tijd verdwijnt en geen pijn veroorzaakt is geen probleem.

2. Toepassen van het hulpmiddel

Aanbrengen van het hulpmiddel

Zorg ervoor dat de hielen helemaal op het einde van het apparaat zitten. Indien het een gesloten model is met vetersluiting of met velcro, deze goed aanspannen zodat de voet stevig omvat is.

Gewenning aan het hulpmiddel

Doordat de voet in het apparaat gecorrigeerd wordt en de normale voetbogen ondersteund worden kan het zijn dat er enige gewenning nodig is. Echter meestal door de extra ondersteuning en de hierdoor verkregen stabiliteit is het kind meestal snel gewoon aan het stappen met de SMO's.

Dragen van het hulpmiddel

In het apparaat wordt best een dunne goed aansluitende kous gedragen. Best in een materiaal dat goed zweet opneemt (katoen). Zorg dat er liefst geen plooien zitten in de kous. Waar de kous dubbel zit kan dit aanleiding geven tot overdruk. Het geheel wordt gedragen in een schoen. Bij de keuze van schoenen kijkt men best naar een iets breder model waarbij de binnenzool kan verwijderd worden, hierdoor ontstaat extra ruimte en moet er geen extra grote maat genomen worden. Best ook een schoen die goed kan aangespannen worden zodat de SMO en de schoen goed op elkaar aansluiten. 's Nachts de orthesen uit de schoenen halen zodat deze aan de lucht kunnen uitdrogen.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

Polypropyleen/ leder + propyleen/ leder + superflex/ streifidur/ leder + streifidur

Reinigingsinstructies

Indien nodig kan de binnenzijde van de SMO gereinigd worden met een doek licht gedrenkt in ether.

Onderhoudsadvies

- Sluiting velcro of veters indien nodig laten vervangen
- Wanneer de tenen gelijk komen met de rand of erover komen is het aangewezen om de orthese te laten nazien om aan te passen of te vervangen.

Recyclage na gebruik

Restafval. Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE VIGO LOCATIES



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

- Pied extrêmement plat ou pied plat plié
- Instabilité de la cheville supérieure
- Laxité générale du pied
- Indiqué chez les enfants atteints de CP (diplegie), de retard de développement moteur avec instabilité, du syndrome de Down, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (stades précoces)

Fonctionnement du produit

Lorsque les ligaments et les muscles du pied n'offrent pas un soutien suffisant et que le pied ne peut pas être corrigé avec une orthèse ordinaire, l'OMU est une bonne alternative.

En enfermant complètement le pied et en fournissant un soutien au-dessus de la cheville, une correction suffisante peut être offerte.

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

Il est possible que des points de pression se produisent dans la structure osseuse du pied. Cela se manifeste par des rougeurs qui, lorsqu'on les enlève, deviennent encore plus intenses et restent rouges pendant longtemps. Cela peut entraîner des douleurs ou, si la sensibilité est réduite, des plaies de pression.

En cas de rougeur anormale, il faut toujours contacter le prestataire de soins pour qu'il ajuste l'appareil.

Une rougeur qui disparaît en très peu de temps et qui ne cause pas de douleur n'est pas un problème.

2. Application du produit

Application de l'orthèse

Assurez-vous que les talons se trouvent à l'extrémité de l'appareil. S'il s'agit d'un modèle fermé avec laçage ou velcro, il faut bien le serrer pour que le pied soit bien fermé.

Habitude à l'orthèse

Comme le pied est corrigé dans l'appareil et que les voûtes plantaires normales sont soutenues, il peut être nécessaire de s'y habituer. Cependant, en raison du soutien supplémentaire et de la stabilité qui en résulte, l'enfant est rapidement habitué à marcher avec les OMU.

Le port de l'orthèse

Il est préférable de porter un bas fin et bien ajusté. Il est préférable d'utiliser un matériau qui absorbe la sueur (coton).

Assurez-vous qu'il n'y a pas de plis dans le bas. Un double bas peut entraîner une surpression. Le tout est porté dans une chaussure.

Lorsque vous choisissez des chaussures, il est préférable de rechercher un modèle légèrement plus large où la semelle intérieure peut être retirée, ce qui crée un espace supplémentaire et vous ne devez pas prendre une taille trop grande.

Il est également préférable d'utiliser une chaussure qui peut être bien serrée afin que l'OMU et la chaussure s'emboîtent bien.

La nuit, enlevez les orthèses des chaussures pour qu'elles puissent sécher à l'air libre.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

Polypropylène/ cuir + propylène/ cuir + superflex/ streifidur/ cuir + streifidur

Instructions de nettoyage

Si nécessaire, l'intérieur de l'OMU peut être nettoyé avec un chiffon légèrement imbibé d'éther.

Conseil en matière de soins

- Remplacement des velcros ou des lacets si nécessaire
- Lorsque les orteils sont au ras du bord ou en surplomb, il est conseillé de faire vérifier l'orthèse pour l'ajuster ou la remplacer.

Recyclage après usage

Déchets résiduels. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre parc à conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

