



Le manuel d'utilisation français commence à la fin du texte néerlandais.

Een valhelm is een helm op maat van de patiënt gemaakt om de schedel, neus en aangezicht te beschermen tegen impact van buitenaf. De helm kan ook gebruikt worden bij patiënten die zichzelf kwetsen (automutilatie).

Un casque de protection est un casque adapté au patient pour protéger le crâne, le nez et le visage contre les chocs. Le casque peut également être utilisé pour les patients qui se blessent (automutilation).

Valhelm

Casque de protection

1. Pathologie / Indicaties

Beoogd gebruik van het product / indicaties

- Valproblematiek
- Epilepsie
- Cerebral palsy
- Motorische retardatie
- Waterhoofd
- Bescherming van implantaten
- Auto mutilatie

Contra-indicaties of mogelijk gebruiksrisico's

De helm is niet gekeurd en vervangt in geen geval de fietshelm of veiligheidshelm.

Technische mogelijkheden

- Er kunnen extra beschermingszones opgebouwd worden al naargelang de meest voorkomende valrichting
- Vizier
- Raster
- Kin bescherming
- Boa-sluiting achteraan voor betere fitting

Persoonlijke opties

- Verschillende openingsmogelijkheden voor verluchting
- Verschillende sluitingsopties:
 - Klikgesp
 - Drukknop
 - Zelfsluitend magneetslot klein
 - Magneetvergrendeling met sleutel
- Verschillende kleurenprints
- Rundsleder kleuren

2. Toepassen van het hulpmiddel

Aanbrengen van het hulpmiddel

De helm wordt aangebracht zoals een fietshelm. Vermits deze op maat vervaardigd werd, zal deze eenvoudig over het hoofd schuiven, maar wel nauw aansluiten. De sluiting moet voor een optimale bescherming steeds gesloten zijn.

Hernieuwing

Kinderen tot 14 jaar hebben elk jaar recht op een nieuwe helm. Vanaf deze leeftijd tot 21jaar moet je de helm twee jaar dragen alvorens een nieuwe mogelijk is. Vanaf de leeftijd van 21jaar of ouder wordt dit 5 jaar.

3. Onderhoud van het hulpmiddel

Gebruikte materialen

De helm is opgebouwd uit een zachte beschermende mousse en een harde buitenlaag (carbontricot, polypropyleen, polyethyleen, dik rundsleder).

Reinigingsinstructies

Er bestaat in België geen recht op onderhoud indien de jaarlijkse hernieuwingstermijn méér dan twee jaar is (vanaf 14jaar). Best kan je de binnenzijde van de helm regelmatig met alcoholgel reinigen en laten drogen aan de lucht. Gebruik in geen geval een haardroger of andere externe warmtebron om de helm te drogen. Dit zal onherstelbare schade veroorzaken aan de helm. De buitenzijde kan je met een vochtige doek proper houden.

Let op! Na zware impact kan je best de helm laten controleren bij een erkend verstrekker om eventuele barsten of andere schade te laten opmeten. In geval van breuk kan hij een vervroegde aanvraag opstarten.

Recyclage na gebruik

Restafval.

Bij vragen, contact opnemen met het plaatselijk containerpark.

SCAN DE QR-CODE VOOR EEN OVERZICHT
VAN ALLE **VIGO LOCATIES**



U KAN ONS CONTACTEREN VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu



1. Pathologie / Indications

Utilisation prévue du produit

- Problèmes d'autisme
- Epilepsie
- Paralyse cérébrale
- Retard moteur
- Waterhead
- Protection des implants
- Auto-mutilation

Contre-indications ou risques éventuels de l'utilisation

Le casque n'est pas homologué et ne remplace pas un casque de vélo ou un casque de sécurité.

Possibilités techniques

Des zones de protection supplémentaires peuvent être construites en fonction de la direction de chute la plus courante.

- Vizier
- Grid
- Protection de la peau
- Boa fermeture à l'arrière pour un meilleur ajustement

Options personnelles

- Différentes possibilités d'ouverture pour la ventilation
- Différentes options de clôture :
 - Boucle à pression
 - Bouton-poussoir
 - Serrure magnétique à fermeture automatique petit
 - Serrure magnétique avec clé
- Des impressions en couleurs différentes
- Couleurs de cuir de boeuf

2. Application du produit

Application du casque

Le casque est appliqué comme un casque de vélo. Comme il est fait sur mesure, il glissera facilement sur la tête, mais s'adaptera bien. La fermeture doit toujours être fermée pour une protection optimale.

Renouvellement

Les enfants jusqu'à 14 ans ont droit à un nouveau casque chaque année. À partir de cet âge et jusqu'à 21 ans, vous devez porter le casque pendant deux ans avant qu'un nouveau casque ne soit possible.

À partir de 21 ans ou plus, elle devient 5 ans.

3. Entretien et maintenance de l'appareil

Matériaux utilisés

Le casque est constitué d'une mousse de protection souple et d'une couche extérieure dure (tricot de carbone, polypropylène, polyéthylène, cuir de vache épais).

Instructions de nettoyage

En Belgique, il n'y a pas de droit à une pension alimentaire si la période de renouvellement annuel est supérieure à deux ans (à partir de 14 ans). Il est préférable de nettoyer régulièrement l'intérieur du casque avec un gel à l'alcool et de le laisser sécher à l'air libre.

N'utilisez en aucun cas un sèche-cheveux ou une autre source de chaleur externe pour sécher le casque. Cela causera des dommages irréparables au casque. L'extérieur peut être maintenu propre avec un chiffon humide.

Attention ! Après un choc violent, il est préférable de faire vérifier le casque par un fournisseur autorisé afin de mesurer les fissures ou autres dommages. En cas de rupture, il peut introduire une demande anticipée..

Recyclage après utilisation

Déchets résiduels. Pour toute question, contactez le bureau parc de conteneurs local.

SCANNEZ LE CODE QR POUR UN APERÇU
DES **LOCATIONS VIGO**



VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER VIA
09 292 20 00 | info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

